

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incubadora diseñada y calibrada para el control a vapor.
- Asegura las condiciones óptimas de incubación garantizando la lectura fiel de los IBs.
- Fabricada en poliestireno de alto impacto.
- Material atóxico de fácil limpieza y conservación
- No posee partes en la carcasa que permiten acumulación de residuos, evitando la proliferación de organismos transmisores de infecciones.
- Posee 5 cavidades (pozos)
- Liviana
- Ideal para consultorio (no ocupa mayor espacio)
- Testigo de encendido

FRECUENCIA

De acuerdo a los estándares mundiales y a la resolución 02183/04 (para Colombia) "se debe colocar al menos semanalmente, preferible a diario y con cada carga que contenga un elemento implantable."

La frecuencia con que se realicen los controles Biológicos es responsabilidad de cada profesional o institución.

MANUAL DEL USUARIO INCUBADORA DE 5 POSICIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incubadora diseñada y calibrada para el control a vapor.
- Asegura las condiciones óptimas de incubación garantizando la lectura fiel de los IBs.
- Fabricada en poliestireno de alto impacto.
- Material atóxico de fácil limpieza y conservación
- No posee partes en la carcasa que permiten acumulación de residuos, evitando la proliferación de organismos transmisores de infecciones.
- Posee 5 cavidades (pozos)
- Liviana
- Ideal para consultorio (no ocupa mayor espacio)
- Testigo de encendido

FRECUENCIA

De acuerdo a los estándares mundiales y a la resolución 02183/04 (para Colombia) "se debe colocar al menos semanalmente, preferible a diario y con cada carga que contenga un elemento implantable."

La frecuencia con que se realicen los controles Biológicos es responsabilidad de cada profesional o institución.

MANUAL DEL USUARIO INCUBADORA DE 5 POSICIONES



INCUBADORA STAR CLAVE

Usted acaba de adquirir la incubadora más práctica y versátil para su consultorio, fabricada de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Este manual le facilitará conseguir los resultados de manera rápida y práctica, pues usted tan pronto termine el tiempo de incubación obtendrá el resultado enseguida de acuerdo al manejo de tiempo de la marca del I.B. elegido por usted, por lo tanto podrá interpretar "in situ" de manera inmediata el resultado de su control Biológico.

Para resultados más rápidos recomendamos el I.B. marca U-Test, el cual le suministrará el primer resultado a las 12 horas y la confirmación en 24 horas, tiempo en que lo hace más ágil, incluso para liberar implantes, sumado a esto el control U-TEST no le dará chance a equivocaciones dado que su diseño le permite colocarlo entre 121°C y 135°C de rango, así como para autoclaves gravitatorios o de pre vacío.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el quipo sobre una superficie nivelada, a temperatura ambiente, de preferencia en el área limpia de central de esterilización.

Conecte el equipo a la red eléctrica. La incubadora STAR CLAVE es de 110 voltios. Un led rojo encenderá indicando que la incubadora está en funcionamiento y en solo 7 minutos se ajustará la temperatura a 57°C.

Después de haber sido procesado en Indicador Biológico (dentro del autoclave), retírelo del esterilizador, déjelo enfriar siga las instrucciones del fabricante de I.B. (romper u oprimir el vial).

Introduzca el vial hasta el fondo del orificio de la incubadora y espere respuesta.

Para apagar la incubadora solamente desconecte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie cada superficie con alcohol de 70% y un paño limpio y seco.

Para Garantizar el correcto mantenimiento del equipo debe llevarlo a Mantenimiento Preventivo cada 6 meses.

INCUBADORA STAR CLAVE

Usted acaba de adquirir la incubadora más práctica y versátil para su consultorio, fabricada de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Este manual le facilitará conseguir los resultados de manera rápida y práctica, pues usted tan pronto termine el tiempo de incubación obtendrá el resultado enseguida de acuerdo al manejo de tiempo de la marca del I.B. elegido por usted, por lo tanto podrá interpretar "in situ" de manera inmediata el resultado de su control Biológico.

Para resultados más rápidos recomendamos el I.B. marca U-Test, el cual le suministrará el primer resultado a las 12 horas y la confirmación en 24 horas, tiempo en que lo hace más ágil, incluso para liberar implantes, sumado a esto el control U-TEST no le dará chance a equivocaciones dado que su diseño le permite colocarlo entre 121°C y 135°C de rango, así como para autoclaves gravitatorios o de pre vacío.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el quipo sobre una superficie nivelada, a temperatura ambiente, de preferencia en el área limpia de central de esterilización.

Conecte el equipo a la red eléctrica. La incubadora STAR CLAVE es de 110 voltios. Un led rojo encenderá indicando que la incubadora está en funcionamiento y en solo 7 minutos se ajustará la temperatura a 57°C.

Después de haber sido procesado en Indicador Biológico (dentro del autoclave), retírelo del esterilizador, déjelo enfriar siga las instrucciones del fabricante de I.B. (romper u oprimir el vial).

Introduzca el vial hasta el fondo del orificio de la incubadora y espere respuesta.

Para apagar la incubadora solamente desconecte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie cada superficie con alcohol de 70% y un paño limpio y seco.

Para Garantizar el correcto mantenimiento del equipo debe llevarlo a Mantenimiento Preventivo cada 6 meses.