



MANUAL DE INSTRUCCIONES INCUBADORA STAR CLAVE SMART DIGITAL

DESCRIPCIÓN: Dispositivo para incubación de controles biológicos para vapor y óxido de etileno con capacidad de 14 viales y un termómetro de alcohol. La Incubadora Star Clave esta diseñada en acero inoxidable.

1.)SELECCIÓN DE TEMPERATURA

Presione el botón  cada vez que el se presiona , la temperatura cambiará de 37 a 57 °C si el led indicador TEMP esta prendido.



PRESIONE PARA CAMBIAR
TEMPERATURA 37 °C , 57 °C



2.)SELECCIÓN DE TIEMPO

Presione el botón  y manténgalo 4 segundos presionado hasta que el led TIME se encienda, una vez éste encendido puede presionar éste botón para cambiar el tiempo de incubación cada vez que él se presiona, el tiempo cambiará de 24, 48 y tiempo indefinido.



PRESIONE PARA CAMBIAR
TIEMPO 24 , 48 , - -



3.)SELECCIÓN DE INICIO

Presione el botón  para dar inicio a la incubación, una vez presionado el led TIME se pone intermitente prende y apaga, hasta que encuentre su temperatura de trabajo este proceso se demora de 15 a 20 minutos para que la incubadora encuentre la temperatura seleccionada. una vez el tiempo de incubación finaliza un aviso sonoro indicará que el proceso de incubación ha finalizado, y mostrará en la pantalla FN



4.)VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA Y TIEMPO

Presione el botón  manténgalo presionado 4 segundos hasta que se prenda el led TEMP, cuando cuando este esta prendido fijo indicará la temperatura que se encuentra la incubadora, para mirar el tiempo, presione el botón  4 segundos hasta que el led TIME se prenda cuando éste esté prendido visualizará el tiempo restante de incubación en horas.

5.) CICLO DE STOP

Presione el botón  hasta que en la pantalla se visualice SP esto indicará que el ciclo esta detenido por ende la incubadora dejará de calentar y apagará su conteo de horas





MANUAL DE INSTRUCCIONES INCUBADORA STAR CLAVE SMART DIGITAL

6.) DETECCIÓN DE CORTE DE LUZ


Si se visualiza en la pantalla el mensaje E1 esto nos indica que hubo un corte de luz durante el proceso de incubación. la incubadora continua con su proceso de incubación y su conteo de horas, hasta que el ciclo se finalice



Para salir de éste modo, mantenga la tecla presionada hasta que vuelva aparecer la temperatura o el tiempo según el led que esté encendido.



7.) PANEL DE COMANDOS

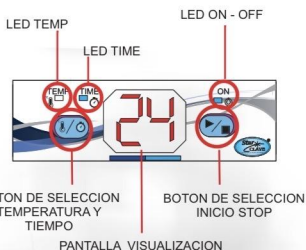

8.) INFORMACIÓN TÉCNICA

- Función para CALIBRAR según norma de equipos médicos
- Sistema de detección por corte de luz
- Para incubación de 14 pruebas biológicas
- Construida en ACERO INOXIDABLE y ALUMINIO en su totalidad.
- No requiere desconectar trabajo pesado
- Incluye TERMÓMETRO DIGITAL para visualizar y TERMÓMETRO ANALÓGICO para validación de carga



Accesorios incluidos

Libre de mercurio

9.) MANTENIMIENTO INCUBADORA

La incubadora **STAR CLAVE SMART DIGITAL** debe ser retornada a la fabrica para la revisión y/o reparación. se recomienda realizar el mantenimiento preventivo una vez al año.

10.) VIDA UTIL DEL PRODUCTO

Incubadora: No Aplica. Este producto no tiene fecha de expiración específica.

11.) CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Incubadora: No Aplica. Este producto no requiere condiciones especiales de almacenamiento

11.) GARANTIA

Por un período de un año, **STAR CLAVE** garantiza que la incubadora **STAR CLAVE Smart Digital**, no presentara fallas; fabricado por **STAR CLAVE** en un estado nuevo y sin uso, no fallará durante un uso normal debido a defectos en materiales y en mano de obra que no sean debido a un mal uso apertura del equipo o accidente aparente.

Esta garantía se considerará validada si el producto viene acompañado por la factura original de compra de un representante autorizado de **STAR CLAVE** y tal factura identifica el artículo por medio de su número de serie e indica claramente la fecha de compra